

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом Председателя**  
**Комитета Фармации**  
**Министерства здравоохранения**  
**Республики Казахстан**  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению**  
**изделия медицинского назначения**

**Название изделия медицинского назначения**

Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения Bioset® Budget с иглой размером: 20G (0.9x38мм), 21G (0.8x38мм), 23G (0.6x38мм)

**Состав и описание изделия**

Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока.

**Наименование производителя**

Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.

**Область применения**

Вливание инфузионных растворов.

**Способ применения**

1. Закрывать роликовый зажим.
2. Ввести пластиковый наконечник системы во флакон или контейнер.
3. Сдавливая капельную камеру, заполнить ее до половины.
4. Открыть роликовый зажим и заполнить трубку системы, выпустив пузырьки воздуха.
5. Закрывать роликовый зажим.
6. Ввести иглу в вену пациента.
7. Отрегулировать скорость потока с помощью роликового зажима. 1 мл = 20 капель (1 капля = 0.05мл).
8. Открыть воздушный клапан при переливании из флакона или жесткого контейнера. Закрывать воздушный клапан при переливании из мягкого контейнера.

**Особые указания по применению**

Для однократного применения. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Использовать сразу же после вскрытия упаковки. Не касаться иглы. Не использовать для переливаний под давлением. Только для гравитационной подачи.

### **Штриховое кодирование**

Штрих-код смотри на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре от -5°C до 35°C относительной влажности воздуха до 80% вдали от прямых солнечных лучей.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности.

### **Стерилизация**

Этиленоксид

**Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства**

Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.

Sanhekou, Zhenglu Town, 213115 Changzhou, Jiangsu, Китай

**Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)**

Медицинская фармацевтическая компания «Биола»

Казахстан, г. Алматы А05F4E4, ул. Монгольская, 44.

Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

post@biola.kz; www.biola.kz

**Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие: GB8368-2005**