

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом Председателя**  
**Комитета Фармации**  
**Министерства здравоохранения**  
**Республики Казахстан**  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению**  
**изделия медицинского назначения**

**Название изделия медицинского назначения**

Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1½", 27Gx1½"; 2мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1½"; 5мл с иглой 22Gx1½"; 10мл с иглой 21Gx1½"; 20мл с иглой 20Gx1½"; 50мл с иглой 18Gx1½", 21Gx1½"

**Состав и описание изделия**

Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.

**Наименование производителя**

Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.

**Область применения**

Подкожное, внутримышечное или внутривенное введение лекарственных препаратов, забор крови, смешивание лекарственных растворов.

**Способ применения**

Снять колпачок с иглы, набрать лекарственный раствор, удалить воздух из цилиндра и приступить к медленному введению.

**Особые указания по применению**

Для однократного применения. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Использовать сразу же после вскрытия упаковки. Не касаться иглы. Уничтожить после использования.

**Штриховое кодирование**

Штрих-код смотри на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре от -5 до 35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

**Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности.

**Стерилизация**

Этиленоксид

**Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства**

Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.

Sanhekou, Zhenglu Town, 213115 Changzhou, Jiangsu, Китай

**Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)**

Медицинская фармацевтическая компания «Биола»

Казахстан, г. Алматы А05F4E4, ул. Монгольская, 44.

Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

post@biola.kz; www.biola.kz

**Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие: ISO 7886-1:2009.**

**Қазақстан Республикасы**  
**Денсаулық сақтау министрлігі**  
**Фармация комитеті Төрағасының**  
**201 жылғы “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_**  
**№ \_\_\_\_\_ бұйрығымен**  
**БЕКІТІЛГЕН**

**Медициналық мақсаттағы бұйымды қолдану**  
**жөніндегі нұсқаулық**

**Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы**

Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1½", 27Gx1½" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1½" инесімен; 5мл 22Gx1½" инесімен; 10мл 21Gx1½" инесімен; 20мл 20Gx1½" инесімен; 50мл 18Gx1½", 21Gx1½" инесімен

**Бұйымның құрамы мен сипаттамасы**

Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.

**Өндірушінің атауы**

Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.

**Қолданылу саласы**

Дәрілік препараттарды тері астына, бұлшықет ішіне немесе вена ішіне енгізу, қан алу, дәрілік ерітінділерді араластыру.

**Қолдану тәсілі**

Инеден қалпақшаны алып, дәрілік ерітіндіні толтыру, цилиндрден ауасын шығарып, баяу енгізуге кірісу керек.

**Қолдану жөніндегі айрықша нұсқаулар**

Бір рет қолдануға арналған. Егер қаптамасы ашылған немесе бүлінген болса, пайдалануға болмайды. Қаптамасын ашқаннан кейін бірден пайдалану керек. Инеге қол тигізуге болмайды.

**Штрихтық кодталуы**

Штрих-кодты қаптамасынан қараңыз.

**Сақтау шарттары**

-5-тен 35°C-ге дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек.

## **Жарамдылық мерзімі**

5 жыл.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

## **Стерилизациялау**

Этилен тотығы

**Медициналық мақсаттағы бұйымды өндіруші ұйымның атауы, заңды мекенжайы, өндірістің орналасқан мекенжайы**

Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.

Sanhekou, Zhenglu Town, 213115 Changzhou, Jiangsu, Қытай

**Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнімнің (тауар) сапасы бойынша шағымдарды қабылдайтын ұйымның атауы**

«Биола» медициналық фармацевтикалық компаниясы

Қазақстан, Алматы қ. А05F4E4, Монгольская к-сі, 44.

Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

post@biola.kz; www.biola.kz

**Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген нормативті құжаттың атауы (белгіленуі): ISO 7886-1:2009.**