

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование медицинского изделия

Стетоскоп медицинский в вариантах исполнения Beerodax® Single и Beerodax® Dual

Описание и техническая характеристика

Beerodax® Single: конусообразные ушные вкладыши, бинауральные трубки оголовья из хромированной латуни, прочная цельная Y-образная звукопроводящая трубка, легкая алюминиевая акустическая головка. Диаметр головки 47 (± 10) мм, длина звукопроводящей трубки 59 (± 1) см.

Beerodax® Dual: конусообразные ушные вкладыши, бинауральные трубки оголовья из хромированной латуни, прочная цельная Y-образная звукопроводящая трубка, алюминиевая акустическая двусторонняя головка: одна сторона - мембрана с неохлаждаемым кольцом, другая - воронка, выполняет разные функции. Диаметр головки с одной стороны 47 (± 10) мм, с другой стороны 32 (± 10) мм, длина звукопроводящей трубки 59 (± 1) см.

Назначение

Используется для прослушивания различных звуков сердца, легких и других органов

Область применения

Функциональная диагностика, терапия, педиатрия, кардиология и другие области применения

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия

При правильной эксплуатации срок службы прибора не ограничен.

Меры предосторожности

Оберегайте стетоскоп от попадания прямых солнечных лучей, повышенной влажности.

Избегайте ударов, загрязнения, попадания агрессивных жидкостей на рабочую поверхность стетоскопа.

Чистите стетоскоп салфеткой, смоченной спиртом или мыльной водой.

Никогда не погружайте стетоскоп в жидкость полностью!

Условия хранения

При температуре от -5 до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха менее 80%, вдали от коррозионных газов.

Штриховое кодирование

Штриховой код указан на упаковке.

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие: GB/T 21417.1-2008.

Наименование организации-производителя

Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd.

No. 42 Xixin Road, Xibei Town, Wuxi City 214194 Jiangsu, Китай

Медицинское изделие изготовлено по заказу

Медицинской фармацевтической компании «Биола»

Республика Казахстан, г. Алматы А05F4E4, ул. Монгольская, 44.

Телефон: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

E-mail: post@biola.kz; www.biola.kz

Наименование, адрес и контактные данные уполномоченного представителя /организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан

Медицинская фармацевтическая компания «Биола»

Республика Казахстан, г. Алматы А05F4E4, ул. Монгольская, 44.

Телефон: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

E-mail: post@biola.kz; www.biola.kz

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке



- беречь от влаги



- беречь от солнечных лучей



- хранить при температуре от -5 до +35°C



- партия



- дата производства



- ознакомьтесь с инструкцией

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҮСҚАУЛЫҚ

Медициналық бұйымның атауы

Медициналық стетоскоп, орындалу нұсқалары Beerodax® Single және Beerodax® Dual

Техникалық сиппатамасы

Beerodax® Single: конус тәрізді құлаққа арналған тығындар, бинауральді хромдалған жезден жасалған түтіктер, берік бүтін Y-тәрізді түтікше, жеңіл алюминийден өндірілген акустикалық бастиек. Бастиек диаметрі 47 (± 10) мм, берік бүтін түтікше ұзындығы 59 (± 1) см.

Beerodax® Dual: конус тәрізді құлаққа арналған тығындар, бинауральді хромдалған жезден жасалған түтіктер, берік бүтін Y-тәрізді түтікше, жеңіл алюминийден өндірілген акустикалық бастиек: бір жағы - салқындатылмаған сақинасы бар мембрана, екіншісі - воронка, әр түрлі атқарымдарды орындайды. Бастиек диаметрі бір жағынан 47 (± 10) мм, екінші жағы 32 (± 10) мм, берік бүтін түтікше ұзындығы 59 (± 1) см.

Тағайындауы

Жүректің, өкпенің және басқа ағзалардың әр түрлі дыбыстарын тыңдау үшін қолданылады

Қолданылу саласы

Функционалды диагностика, терапия, педиатрия, кардиология және басқа қолдану салалары

Медициналық техниканы пайдалану кезіндегі кепілдеме мерзімі

Құралдың қызмет мерзімі дұрыс пайдаланған жағдайда шектелмеген

Сақтық шаралары

Стетоскопты күн сәлуесінің тікелей түсуінен, шамадан тыс ылғалдылықтан сақтаңыз.

Стетоскоптың жұмыс бетін соққыдан, ластанудан агрессивтік сұйықтықтардың тиюінен аулақ ұстаңыз.

Стетоскопты спиртпен немесе сабын сумен ылғалдатылған майлықпен тазалаңыз.

Ешқашан стетоскопты толығымен сұйықтыққа батырмаңыз.

Сақтау шарттары

-5 - +35°C температура және ауаның салыстырмалы ылғалдығы 80%-дан төмен жағдайда сақтау қажет, коррозиялаушы газдардан алыста.

Штрихтік кодтау

Штрих кодты қаптамадан қараңыз.

Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген нормативті құжаттың атауы (белгіленуі): GB/T 21417.1-2008.

Медициналық мақсаттағы бұйымды өндіруші ұйымның атауы, заңды мекенжайы, өндірістің орналасқан мекенжайы
Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd.
No. 42 Xixin Road, Xibei Town, Wuxi City 214194 Jiangsu, Қытай

Тапсырысы бойынша

«Биола» медициналық фармацевтикалық компаниясы тапсырысы бойынша
Қазақстан, Алматы қ. А05F4E4, Монгольская к-сі, 44.
Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.
post@biola.kz; www.biola.kz

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық бұйым бойынша шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және медициналық бұйымның қауіпсіздігін тіркеуден кейінгі бақылауға жауапты ұйым және өндірушінің уәкілетті өкілі

«Биола» медициналық фармацевтикалық компаниясы ЖШС
Қазақстан, Алматы қ. А05F4E4, Монгольская к-сі, 44.
Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.
post@biola.kz; www.biola.kz

Таңбалау кезінде пайдаланылатын символдар:



- Ылғалдан қорғау керек



- тікелей күн сәулесінен қорғау



- -5° тен - + 35°С-ге дейінгі температурада сақтау керек



- нөмір партиясы



- өндірілген күні



- нұсқаулықты оқып шығыңыз