

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом Председателя**  
**Комитета Фармации**  
**Министерства здравоохранения**  
**Республики Казахстан**  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению**  
**изделия медицинского назначения**

**Название изделия медицинского назначения**

Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м

**Состав и описание изделия**

Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.

**Наименование производителя**

Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd.

**Область применения**

Применяется для защиты мелких ран, фиксации перевязочного материала, закрепления канюль, капельниц, дренажных трубок.

**Способ применения**

Очистить кожу, затем прорезать и оторвать ленту необходимой длины, приклеить на нужное место.

**Штриховое кодирование**

Штрих-код смотри на упаковке.

**Условия хранения**

При температуре от -5°C до 30°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

**Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

### **Побочные действия**

Раздражение кожи. В этом случае следует прекратить использование пластыря. Признаки раздражения кожи исчезают без какого-либо вреда для кожи.

### **Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства**

Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd.

No.55 Yuejin Road, Zouqu Town 213144 Changzhou, Китай

### **Наименование, юридический адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии/предложения**

Медицинская фармацевтическая компания «Биола»

Казахстан, г. Алматы А05F4E4, ул. Монгольская, 44.

Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

post@biola.kz; www.biola.kz

### **Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие: YZB/SU2502-2015.**

Символы, использованные при маркировке:



- хранить при температуре от -5 до 30°C



- защищать от влаги

CE 0123 - соответствие директиве ЕС



- партия



- дата производства



- дата окончания срока годности



- для однократного применения

**Қазақстан Республикасы**  
**Денсаулық сақтау министрлігі**  
**Фармация комитеті Төрағасының**  
**201 жылғы “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_**  
**№ \_\_\_\_\_ бұйрығымен**  
**БЕКІТІЛГЕН**

**Медициналық мақсаттағы бұйымды**  
**қолдану жөніндегі нұсқаулық**

**Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы**

Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax<sup>®</sup> орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м

**Бұйымның құрамы және сипаттамасы**

Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған.

**Өндірушінің атауы**

Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd.

**Қолданылу саласы**

Ұсақ жараларды қорғау, таңу материалын, канюляларды, тамызғыларды, құрғатқыш түтікшелерді бекіту үшін қолданылады.

**Қолдану тәсілі**

Теріні тазарту, одан кейін қажетті ұзындықтағы лентаны кесіп, үзіп алып, керек жерге жапсыру керек.

**Штрихтік кодтау**

Штрихтық коды қаптамасында көрсетілген.

**Сақтау шарттары**

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын және -5°С-ден 30°С-ге дейінгі температурада.

**Жарамдылық мерзімі**

2 жыл.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолданбау керек.

**Жағымсыз әсерлері**

Терінің тітіркенуі. Бұл жағдайда бұласырды пайдалануды тоқтату керек. Терінің тітіркену белгілері теріге қандай да бір зиянсыз кетеді.

**Медициналық мақсаттағы бұйымды өндіруші ұйымның атауы, заңды мекенжайы, өндірістің орналасқан мекенжайы**

Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd.

No.55 Yuejin Road, Zouqu Town 213144 Changzhou, Қытай

**Қазақстан Республикасы аумағында шағымдарды/ұсыныстарды қабылдайтын ұйымның атауы, заңды мекенжайы**

«Биола» медициналық фармацевтикалық компаниясы

Қазақстан, Алматы қ. А05F4E4, Монгольская к-сі, 44.

Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

post@biola.kz; www.biola.kz

**Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген нормативті құжаттың атауы (белгіленуі): YZB/SU2502-2015.**

Таңбалау кезінде пайдаланылатын символ:



- -5 °C дан 30 °C температурасында сақтау керек



- ылғалдан қорғау керек

CE 0123 - ЕО нұсқауына сәйкестік



- топтама



- өндірілген күні



- жарамдылық мерзімі



- бір рет пайдалануға арналған