

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
« ____ » _____ 201_г.
№ _____

Инструкция по медицинскому применению
изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения

Бинт медицинский марлевый Biotendax® стерильный и нестерильный размерами: 10смх5м, 14смх7м, с ячейкой 24х20, 19х15

Состав и описание изделия

Бинты изготовлены из 100% хлопковой отбеленной медицинской марли. Белизна не менее 80%, мягкие, хорошо вентилируются и абсорбируют жидкости. В зависимости от назначения бинты изготавливают различной длины, ширины и размера ячейки.

Бинт нестерильный предназначен для применения в медицинской практике в качестве перевязочного материала для наложения фиксирующих повязок, поверх стерильного перевязочного материала, для фиксации суставов и конечностей. Бинт стерильный применяется при операциях, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

Наименование организации-производителя

Taizhou Xinkang Medical Materials Co., Ltd.

Область применения

ЛПУ, в быту

Способ применения

1. Вскрыть индивидуальную упаковку.
2. Наложить повязку на раневую поверхность кожи или изготовить операционно-перевязочные средства.

Штриховое кодирование

Штрих-код см. на упаковке.

Условия хранения

При температуре от -5 до 35°C и относительной влажности воздуха ≤80%.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности.

Стерилизация

Гамма-излучение (стерильный).

Особые указания

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Применять только по назначению. Не допускается повторное применение.

Изготовлено по заказу

ТОО МФК «Биола»

Организация-производитель

Taizhou Xinkang Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Wuzhou (South) Road, 225300 Taizhou Jiangsu, Китай

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству изделия медицинского назначения

Медицинская фармацевтическая компания «Биола»

Казахстан, г. Алматы А05F4E4, ул. Монгольская, 44.

Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

post@biola.kz; www.biola.kz

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие: YZB/TAI2003/1-2015.

Символы, использованные при маркировке:



- защищать от влаги



- защищать от прямых солнечных лучей



- хранить при температуре от -5° до 35°С



- стерилизация гамма-излучением

Медициналық мақсаттағы бұйымды
медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы

Стерильді және стерильді емес Biotendax® медициналық дәке бинті, өлшемдері: 10смх5м, 14смх7м, ұяшықтары 24х20, 19х15

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы

Бинттер 100% ағартылған медициналық мақталы дәкеден дайындалған. Ағартқыш 80% кем емес, жұмсақ, жақсы желдетіледі және сұйықтықты сіңіреді. Тағайындалуына байланысты бинттер ұзындығының, ендігінің және ұяшығының өлшемдері әр түрлі дайындалады.

Стерильді емес бинт стерильді таңғыш материалдың үстіне бекіткіш таңғыштарды төсеу үшін, буындар мен аяқ-қолды бекіту үшін таңғыш материал ретінде медициналық іс-тәжірибеде қолдануға арналған. Стерильді бинт операциялар кезінде, қан тоқтату үшін, жараларды салдарлы ластанудан және құрғаудан сақтандыру үшін таңуға қолданылады.

Өндірушінің атауы

Taizhou Xinkang Medical Materials Co., Ltd.

Қолданылу саласы

ЕПМ, тұрмыста

Қолдану тәсілі

1. Жеке қаптаманы ашыңыз.
2. Таңғышты терінің жараланған жеріне салыңыз немесе операциялық-таңғыш заттарды дайындаңыз.

Штрихтік кодтау

Штрих-кодты қаптамасынан қараңыз.

Сақтау шарттары

-5°C-ден 35°C-ге температурада және ≤80% салыстырмалы ауа ылғалдылығында.

Жарамдылық мерзімі

5 жыл.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Стерилизациялау

Гамма-сәулелену (стерильді)

Айрықша нұсқаулар

Егер қаптама ашылған, бүлінген болса пайдаланбау керек. Тағайындалуы бойынша ғана қолданыңыз. Қайта қолдануға жол берілмейді.

ЖШС «Биола» МФК тапсырысы бойынша шығарылған.

Медициналық мақсаттағы бұйымды өндіруші ұйымның атауы, заңды мекенжайы, өндірістің орналасқан мекенжайы

Taizhou Xinkang Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Wuzhou (South) Road, 225300 Taizhou Jiangsu, Қытай

Қазақстан Республикасы аумағында шағымдарды/ұсыныстарды қабылдайтын ұйымның атауы, заңды мекенжайы

«Биола» медициналық фармацевтикалық компаниясы

Қазақстан, Алматы қ. А05F4E4, Монгольская к-сі, 44.

Тел: +7 (727) 337 76 36, 337 76 39.

post@biola.kz; www.biola.kz

Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген нормативтік құжаттың атауы (белгіленуі): YZB/TAI2003/1-2015.


Таңбалау кезінде пайдаланылатын символдар:



- ылғалдан қорғау керек



- тікелей күн сәулесінен қорғау керек

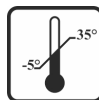

- -5°C ден 35 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек



- стерилизациясы гамма-сәулеленумен